

Регламент диагностики волос на аппарате ASW aram

Диагностика кожи головы и волос.

Диагностика кожи головы и волос занимает 30 минут.

Диагностика включает в себя:

Степень состояния облысения, акне на коже головы, состояние кожи головы, плотность волос, кератин кожи головы, капиллярные сосуды, толщина стержня волоса, состояние волосяной поры, состояние кутикулы.

Линзы для диагностики кожи головы и волос:

Линза X 1 Состояние облысения.

Линза X 60 Акне кожи головы, состояние кожи головы, плотность волос, кератин кожи головы, капиллярные сосуды.

Линза X 200 Толщина стержня волоса, состояние волосяной поры.

Линза X500 Состояние кутикулы.

Этапы работы:

Выберите ANALYSIS чтобы начать диагностику.

Введите данные о пациенте. Ф.И.О, возраст, пол, электронную почту.

Дистанционно держа камеру сделайте снимок лица пациента.

Среди списка пациентов выберите конкретное лицо для проверки или начала анализа.

Проверьте информацию пациента и список результатов анализа.

Определение состояния облысения:

Нажмите кнопку «Сделать фото»/ «Live Capture».

Сделайте фото передней и височной зоны и выберите кнопку Анализ.

Выберите наиболее подходящий вариант из базы данных.

Проверьте результат.

Определение состояния кожи головы:

Установите линзу на кожу головы, нажмите кнопку Сделайте фото.

Нажмите кнопку Анализ.

Выберите наиболее подходящий пример из базы данных.

Нажмите кнопку Анализ.

Определение плотности волос:

Линза X 60. Установите линзу на кожу головы, нажмите кнопку Сделайте фото.

Нажмите кнопку Анализ.

Выберите наиболее подходящий пример из базы данных.

Посчитайте количество волос на фото.

Проведите анализ

Определение кератина волосистой части головы:

Линза X 06.

Нажмите кнопку «Сделать фото»/ “Live Capture”,сделайте фото кожи головы и нажмите кнопку PL чтобы проанализировать.

Выберите кнопку СРАВНИТЬ/COMPARE чтобы сравнить фото кожи с образцом из базы данных.

Выберите подходящий вариант.

Проверьте результат.

Определение наличия визуализирующихся патологических сосудов.(Купероз)

Линза X 60.

Нажмите кнопку «Сделать фото»/ “Live Capture”,сделайте фото кожи головы и нажмите кнопку PL чтобы проанализировать кожу головы.

Выберите кнопку СРАВНИТЬ/COMPARE чтобы сравнить фото кожи с образцом.

Выберите наиболее подходящий образец из базы данных.

Проверьте результат.

Определение наличия Акне кожи головы:

Линза X 60.

Нажмите кнопку «Сделать фото»/ “Live Capture”,сделайте фото и нажмите кнопку PL чтобы провести анализ.

Выберите кнопку РАВНИТЬ/COMPARE чтобы сравнить фото кожи с образцом.

Выберите наиболее подходящий вариант из базы данных.

Проверьте результат.

Определение толщины стержня волоса:

Линза X 30.

Нажмите кнопку «Сделать фото»/ “Live Capture”,сделайте фото и нажмите кнопку PL для анализа.

Выберите кнопку Анализа чтобы сравнить фото кожи с образцом.

Выберите волос который вы хотите измерить.Значение будет посчитано автоматически.

Проверьте результат.

Определение состояния волосяной поры:

Линза X 200.

Нажмите кнопку «Сделать фото», чтобы активировать камеру.

Сделайте фото кожи головы и выберите кнопку «Анализ».

Выберите наиболее подходящий вариант из базы данных

Проверьте результат.

Определение состояния кутикулы:

Линза X 500.

Нажмите кнопку «Сделать фото», чтобы активировать аппарат.

Сделайте фото кожи головы и выберите кнопку Анализ.

Выберите наиболее подходящий образец из базы данных.

Для просмотра всех результатов выберите кнопку «Показать результаты».

Результат:

Выберите значок диагностики или наименование каждого анализа на семиугольнике, чтобы увидеть результат. Если вы выберете Рекомендуемый продукт, то вы сможете посмотреть продукцию.

Расходные материалы для диагностики:

Ватные диски 6 шт.

Перчатки нитрил 1 пара.

Хлоргексидин Биглюконат 10 мл.

Лоток многоразовый металлический.

Директор

Шатохин А.В.

